

ANIOS RL

CE

Rinçant
Lubrifiant de
l'instrumentation



- Rinçant lubrifiant avec activateur de séchage.
- Haute compatibilité avec les polysulfones.
- Spécialement adapté pour une combinaison avec ANIOSYME DLM.
- S'utilise dans tout type de machines.

INDICATIONS

Rinçant neutre avec effet lubrifiant pour les instruments chirurgicaux et médicaux. Produit combiné qui assure un séchage rapide sans trace.

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide incolore
- pH du produit pur à 20°C: env. 7
- pH à la dilution de 0,2%: 7,7
- Densité à +20°C: Env. 1,012



DILUTION
AUTOMATIQUE
soit 0,8 à 3 ml → 1 L



ANIOS RL

Rinçant lubrifiant de l'instrumentation

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée.

Injection en eau froide ou chaude, aux dilutions de 0,08 à 0,3% (soit 0,8 à 3 ml par litre d'eau) selon le type de machine.

ANIOS RL est recommandé lors d'un rinçage avec une eau de qualité osmosée ou déminéralisée.

COMPOSITION QUALITATIVE

Condensats d'oxyde d'éthylène et propylène.

Dérivés glycoliques.

Alcools gras à effet anti-mousse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à l'étiquette (Précautions d'emploi établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).

Stockage : entre +5°C et +35°C.

CONDITIONNEMENTS

2 Bidons de 5 L.....0315.038

Bidon de 10 L.....0315.024

Bidon de 25 L.....0315.005

