

BANDETTES DE CONTROLE DE LA DILUTION DU BAIN

Pour solution d'ANIOSEPT ACTIV

INDICATION

Contrôle de la dilution du bain d'ANIOSEPT ACTIV.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les bandelettes sont stables 18 mois si elles sont stockées dans un endroit sec et frais, à une température inférieure à +30°C;

Conserver le flacon fermé afin de garantir la durabilité des bandelettes.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de la dilution de la poudre
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 5 secondes.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 15 secondes après trempage.
Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 20 secondes après trempage.



CONTROLE DE LA BANDELETTE

Coloration vert clair

▶ Solution à 0.5%



Coloration vert foncé

▶ Solution à 1%



Coloration bleue

▶ Solution à 2%

